

# HELIUM

## EIN STARKER AUFTRITT





**HELIUM**

# HERAUSRAGENDE LEISTUNG

Die neue Helium-Generation glänzt erneut mit neuen Funktionen und innovativen Technologien. Das Ergebnis: Ein extrem zuverlässiger, ultraleichter Starrrahmenrollstuhl mit besten Fahreigenschaften. Sein ausgezeichnetes Fahrverhalten und die schnelle, direkte Reaktion auf jede Bewegung machen den Helium zum perfekten Begleiter bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens.

Egal, wo Sie sind, was Sie tun oder wohin Sie wollen – auf Ihren Sopur Helium können Sie sich immer verlassen.





### // EXTREM LEICHT, EXTREM ZUVERLÄSSIG

Dank innovativer Hightech-Materialien und -Fertigungsverfahren wurde das Gewicht des Helium auf bis zu 6,4 kg reduziert und erlaubt dennoch eine maximale Zuladung bis 125 kg.

### // OPTIONALER 88° KOMPAKTRAHMEN

Machen Sie Ihren Rollstuhl noch kompakter – für einen aktiveren Look und einfaches Manövrieren in engen Räumen.

### // ULTRALEICHT

Hochwertigste Materialien (Aluminium der 7000er Serie), ovalisierte Rahmenrohre und hydrogeformte, verschweißte Lenkradanbindungen machen den Rahmen einzigartig leicht und gleichzeitig extrem robust.



### ❶ GEKRÖPFTER HOCHLEISTUNGSRAHMEN

Die aktive Rahmenkonstruktion mit bis zu 30 mm Rahmenkröpfung verbessert die Positionierung der Unterschenkel und gibt dem Rollstuhl einen sportlichen Look.

### ❷ OVALES QUERROHR MIT GUMMIGRIFF

Das ovale Querrohr am Rahmen dient als sicherer und ergonomischer Griff und ist optimal ausbalanciert – für einfaches und sicheres Verladen des Rollstuhls.

### ❸ ACHSROHR AUS CARBON

Das Achsrohr aus Carbon ist extrem steif, ultraleicht und überzeugt mit einer fantastischen Optik.



# IHR EIGENER STIL

Das minimalistische, ultramoderne Design des Helium bleibt dezent im Hintergrund, damit Sie im Rampenlicht stehen.

Ganz individuell auf Sie und Ihren Lebensstil zugeschnitten unterstreicht der Helium Ihre Persönlichkeit.





### // ULTRAMODERNER FREESTYLE BACK

Dieser innovative Rücken ermöglicht volle Bewegungsfreiheit des Oberkörpers. Als Option erhältlich.

Der unverwechselbare Stil des Freestyle Backs macht aus Ihrem Helium-Rollstuhl ein echtes Original. Wählen Sie die Rückenschale aus Carbon für die leichteste Lösung oder die Aluminiumschale in Rahmenfarbe für einen ganz individuellen Look. Beide Lösungen verbessern die Rumpfstabilität und unterstützen Ihr aktives Leben.


### // DER GANZ BESONDERE

Mit farblich passenden Antriebsrädern runden Sie das individuelle Farbkonzept Ihres Rollstuhls ab.



### // INDIVIDUELLER LOOK

Sie können Ihren Helium jetzt noch individueller gestalten: Mit unserer neuen Rahmengrafik. Dezent oder auffallend – Sie haben die Wahl aus fünf Farben.

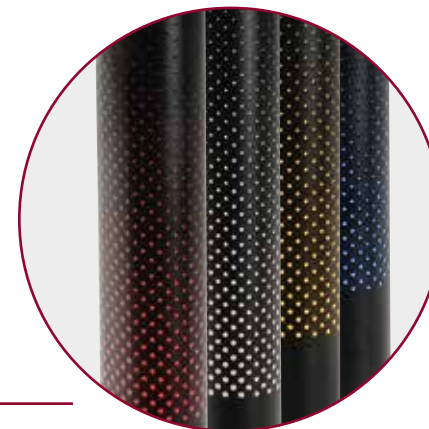

### // IHR HELIUM, IHRE FARBAUSWAHL

Wählen Sie aus 32 Rahmenfarben.



### // UNTERSTREICHEN SIE IHREN EIGENEN STIL

Auch bei Lenkergabel, Rädern, Aufklebern, Rückenplatte und Klemme der Achsaufnahme können Sie aus fünf markanten Farbausführungen wählen.





# EIN GRUNDGEDANKE ZWEI KONZEPTE



## **HELIUM**

### **// DER ANPASSBARE HELIUM**

Der Helium beeindruckt mit seinem puren Design und seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Dank stufenlos verstellbarem Schwerpunkt lässt sich das Fahrverhalten von sehr sicher bis sehr aktiv einstellen. Selbstverständlich können Sie auch Rückenwinkel oder die hintere Sitzhöhe auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



## **HELIUM PRO**

### **// DER ULTIMATIVE HELIUM PRO**

Der Helium Pro ist die Version mit fest verschweißtem Rahmen. Die feste Achsaufnahme sorgt für ein Höchstmaß an Steifigkeit bei gleichzeitig minimalstem Gewicht.

Mit fest verschweißtem oder winkleinstell- und abklappbarem Rücken erhältlich.



## OPTIONEN UND FUNKTIONEN

Konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen Helium. Weitere Informationen zu Produktoptionen finden Sie auf dem Bestellblatt.



### // ABNEHMBARE SCHIEBEGRIFFE

Die optionalen Schiebegriffe für den Freestyle Back sind abnehmbar und können in der Rückentasche verstaut werden. So sind sie bei Bedarf jederzeit verfügbar.



### // LEICHTGEWICHTSRÜCKEN

Mit ergonomischem Handgriff zum einfachen Transport. Die Exo-Bespannung ist mit einem Einfassband in fünf verschiedenen Farben erhältlich.



### // NEUES SEITENTEIL AUS CARBON

Ein individuell gestaltetes und leichtes Seitenteil mit optimierter Passform für eine hochwertige Optik. Erleichtert das Abklappen des Rückens und schützt Ihre Kleidung.



### // EINARM-GABEL AUS ALUMINIUM

In fünf Farben erhältlich. In Kombination mit den farbig eloxierten Lenkrollen ein echter Blickfang.



### // DURCHGEHENDES CARBON-FUSSBRETT

Leichtes, stabiles und winkleinstellbares Fußbrett aus Carbon – jetzt mit erweiterter Tiefeneinstellung.



### // LEICHTGEWICHTS-SITZBESpannung

Durch Klettverschlüsse leicht und individuell anpassbar für eine optimale Positionierung. Als Option erhältlich.



### // ARRETIERBARER RÜCKEN

Die Arretierung (optional) verhindert, dass der gefaltete Rücken ungewollt aufklappt. Erleichtert den Transport und das Verstauen des Rollstuhls.



### // SURGE® LT GREIFRINGE

Der Gripton Gummistreifen an der Oberseite des ergonomisch geformten, ovalen Greifrings sorgt für perfekten Grip.

# TECHNISCHE DATEN

HELIUM			
<b>Max. Zuladung</b>	125 kg (100 kg für Proton Räder, Leichtgewichts-Sitzbespannung, Leichtgewichtsrücken)	<b>Gesamtlänge</b>	910 mm
		<b>Gesamthöhe</b>	1120 mm
<b>Rahmenversion</b>	Verstellbar (Helium) + fest verschweißt (Helium Pro)	<b>Max. Wendekreis</b>	880 mm
<b>Rahmenkröpfung</b>	0 mm, 10 mm, 30 mm (auf jeder Seite)	<b>Max. sichere Neigung</b>	7° (für die Nutzung der Feststellbremsen)
<b>Rahmenwinkel</b>	100° / 92° / 88°	<b>Lenkräder</b>	3"/4"/5"/6"
<b>Sitzbreite</b>	320 – 460 mm (in 20 mm Schritten)	<b>Antriebsrad</b>	24"/25"
<b>Sitztiefe</b>	340 – 480 mm (in 20 mm Schritten)	<b>Rollstuhlgewicht</b>	Helium Pro ab 6,4 kg / Helium ab 6,8 kg
<b>Vordere Sitzhöhe</b>	430 – 570 mm (in 10 mm Schritten)	<b>Transportgewicht</b>	ab 4,8 kg
<b>Hintere Sitzhöhe</b>	370 – 500 mm (in 10 mm Schritten)	<b>Abnehmbare Teile</b>	Hinterräder (nur für den Transport)
<b>Rückenhöhe</b>	250 – 450 mm (in 25 mm Schritten)	<b>Farben</b>	32
<b>Rückenwinkel</b>	-31° bis 15° in 3,5° Schritten	<b>Crash-getestet</b>	Ja (für den Transport in Fahrzeugen gemäß ISO 7176-19 zugelassen) (außer Helium Pro und Freestyle Back)
<b>Schwerpunkt</b>	Stufenweise verstellbar um insges. 84 mm, von 20 bis 104 mm	<b>Transport ohne Nutzer</b>	Den Rollstuhl sicher im Fahrzeug (z.B. Auto) befestigen.
<b>Radsturz</b>	0°, 3°, 6°, 9°	<b>Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.</b>	18.50.03.0167
<b>Gesamtbreite</b>	SB + 170 mm (0°); SB + 230 mm (3°); SB + 290 mm (6°); SB + 350 mm (9°). Je nach Konfiguration kann die Gesamtbreite 700 mm überschreiten.	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung und Umgebung</b>	Für gehbehinderte Personen (Kinder und Erwachsene); Gebrauch im Innen- und Außenbereich.

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf [www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de) zur Verfügung.



## Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4  
69254 Malsch/HD  
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222  
E-Mail: [kundenservice@sunrisemedical.de](mailto:kundenservice@sunrisemedical.de)  
[www.SunriseMedical.de](http://www.SunriseMedical.de)

